

Gentile Dottore/ssa,

Grazie per aver scelto un test della linea Nutrinext®, la invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni per eseguire una corretta raccolta del DNA.

ATTENZIONE!

Per effettuare correttamente la procedura di raccolta non invasiva del DNA, mediante tampone buccale, è importante ricordare al paziente di:


- Non mangiare
- Non bere
- Non fumare
- Non masticare gomme
- Non lavare i denti

durante l'ora precedente alla raccolta.

Può inoltre essere utile un breve risciacquo con acqua naturale a temperatura ambiente prima di procedere allo strofinamento con il tampone.

PROCEDURA DI RACCOLTA

1. Aprire la confezione.

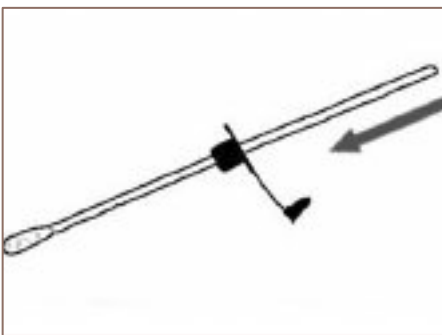

2. Estrarre il tampone dalla provetta mantenendo il tappino forato in plastica intorno al bastoncino del tampone


Attenzione! Non toccare la parte in cotone del tampone per evitare la contaminazione!




3. E' consigliabile strofinare il tampone su entrambe le guance e sulla mucosa interna delle labbra.

4. Per una raccolta standard è sufficiente eseguire la procedura di strofinamento per 60 secondi.

5. Alla fine della raccolta maneggiare il tampone accuratamente.

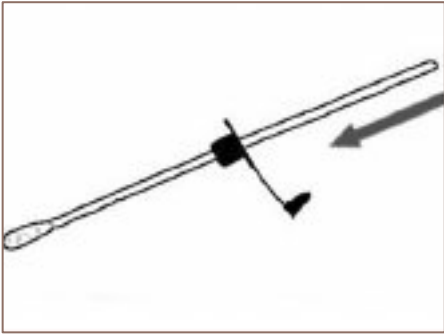

6. Inserire nuovamente, dal fondo del bastoncino, il tappino forato in plastica facendo attenzione a mantenere la parte da richiudere verso l'alto.

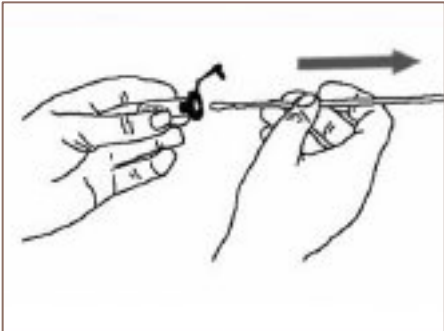

7. Inserire la parte in cotone del tampone nella provetta.

8. Chiudere accuratamente il tappino in plastica sulla provetta e successivamente sfilare il bastoncino attraverso il foro. Lasciando all'interno della provetta solo la parte in cotone del tampone.



9. Chiudere l'ultima parte del tappino accuratamente fino a sentirne lo scatto definitivo che preserverà il campione durante la spedizione.

10. Applicare l'etichetta con il nome del paziente sulla provetta.

11. Il DNA così raccolto si spedisce a temperatura ambiente all'interno della scatola corredato di foglio di accettazione.

12. Inserire tutto nella busta del corriere e procedere alla spedizione.