

Indicazioni per la gestione del campione

1

Prima della raccolta

Controllo della documentazione da allegare al campione

- Compilare Consenso informato
- Compilare Test Request Form


2

Raccolta del campione

Indossare i guanti prima di effettuare il prelievo. Assicurarsi che il paziente non abbia mangiato, bevuto (eccetto acqua), fumato, lavato i denti e masticato chewing gum nell'ora precedente il prelievo del campione


2.1

Aprire la busta (Fig. A). Tenere il tubo di plastica con una mano e usando il pollice, spingere la parte alta del tappo per facilitare l'apertura (Fig. B). Inserire il tampone nel cavo orale del paziente, sopra la lingua, e inumidirlo di saliva. Far chiudere al paziente la bocca e tenere il tampone in posizione per 10 secondi (Fig. C).

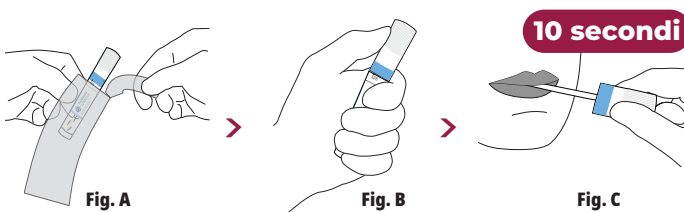


2.2

Per migliorare il prelievo, con l'indice e il medio, premere il tampone contro l'interno della guancia. Spostare il tampone verso un lato del cavo orale e strofinare energicamente 10 volte contro l'interno della guancia, vicino alla parete gengivale.

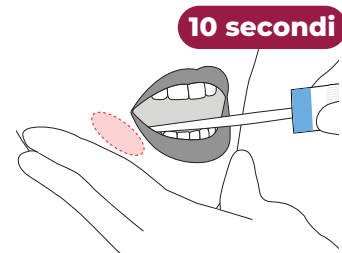


2.3

Ripetere il passaggio 2.2 sul lato opposto del cavo orale.

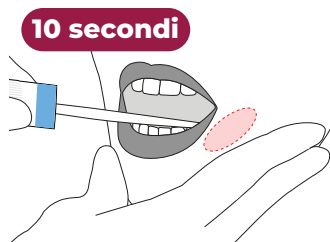

2.4

Dopo il prelievo, reinsertire il tampone nel tubo in plastica e chiudere saldamente.

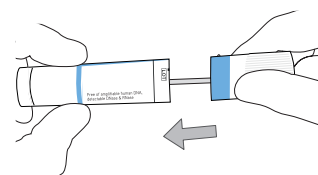

3

Prima della spedizione

Etichettatura delle provette con i dati del paziente

- Nome e cognome del paziente
- Data di nascita del paziente
- Data e ora del prelievo

4

Preparazione della spedizione

Inserire la provetta con il tampone all'interno del box in cartone in dotazione per il trasporto

- Il campione si conserva e viaggia a T° Ambiente
- Chiudere con cura la scatola
- Spedire il campione appena possibile

5

Spedizione

Preparazione del pacco e ritiro del corriere

- Inserire nella scatola la documentazione compilata (vedi step 1) e il campione
- Inserire la scatola nella busta del corriere (in dotazione) e sigillare
- Chiamare il numero verde per organizzare il ritiro



o scrivere a logistica@laboratorigenoma.it specificando nome e cognome, luogo del ritiro completo, data e ora, recapito telefonico.

- Inserire la lettera di vettura nell'apposita custodia trasparente sulla busta del corriere (lettera di vettura non necessaria per il comune di Roma e Milano)
- Attendere il ritiro del campione nelle fasce orarie indicate